


הנחיות שליחה למעבדה

1. **דם:**
 - ❖ **דם מלא** במבחנת EDTA או הפרין, לפחות 0.5 מ"ל.
2. **סטריפ:**
 - ❖ יש להשתמש בסטריפ המסופק על ידי המעבדה, ולהספיגו בדם (טיפה בקוטר של כ-6 מ"מ ומעלה).
 - ❖ יש להשתמש בכפפות ולהמנע ממגע עם הדם על מנת למנוע זיהום של הדגימה.
 - ❖ יש לתת לסטריפ להתייבש באופן טבעי במקום נקי למשך **3 שעות לפחות**. אין להשתמש באמצעים חיצוניים לייבוש הסטריפ כגון פן או מזגן. הדם צריך להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסטריפ לשקית למניעת התפתחות פטריות ועובשים הפוגעים באמינות הבדיקה.
3. **סוואב**
 - ❖ עבור פתוגנים רלוונטיים ניתן לשלוח סוואב סטרילי **ללא אגר**.
4. **רקמות**
 - ❖ עבור פתוגנים רלוונטיים ניתן לבדוק רקמות שונות המאפיינות את המחלה כגון קראסטים, נוזל בית חזה, נוזל עמוד שדרה, הפרשות עיניים וכד'.
5. **אופן השליחה למעבדה**
 - ❖ דגימות גנטיות ופתוגנים על סטריפ ניתן לשלוח בדואר, פרט לבדיקת וירוס RNA ו-PKD, שלא ניתן לבדוק מסטריפ.
 - ❖ בשליחת מבחנה יש לשמור את המבחנה בקירור עד מועד האיסוף באמצעות שליח ולא יאוחר מ-48 שעות מרגע הוצאת הדם, בתאום עם המעבדה או הבאת הדוגמא באופן עצמאי למעבדה.
6. **הערות נוספות**
 - ❖ ניתן לבדוק את וירוס ה- Distemper ו- Calici כ- 21 יום לאחר מתן החיסון על מנת לא לפגוע באמינות התוצאות. פתוגנים אחרים ניתן לבדוק כ-5 ימים לאחר מתן החיסון.
 - ❖ לבדיקת פתוגנים לאחר קבלת טיפול יש להמתין כ- 5 ימים לאחר סיום הטיפול.
 - ❖ בבדיקת וירוס ה- Calici יש לציין אם החתול חוסן ומתי.

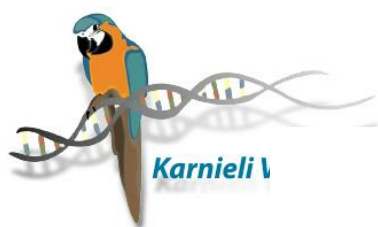

קרניאלי וט בע"מ המרכז לאבחון מולקולרי וטיפול בתאי גזע בבעלי חיים

ת.ד 1121 קרית טבעון מיקוד: 36015 טלפון: 04-9536166 פקס: 04-9536165
דואר אלקטרוני: vet@karnieli.com אתר: www.karnieli-vet.co.il