



דרישות לשליחת דגימה למעבדה:

❖ 1 מ"ל סרום ❖ לא נדרש צום ❖ יש להמנע מהמוליזיס וליפמיה ❖	דרישות הדגימה
לאחר הדיגום וההפרדה יש להקפיא את הסרום <u>מיד</u> ב- 20°C- וליצור קשר עם המעבדה ניתן לשמר את הדגימה במקפיא (-20) עד 30 ימים.	יציבות הדגימה
יש לצרף לדגימת הסרום הקפואה טופס הגשת הבדיקה <u>מלא</u>	שליחת הדגימה
באמצעות שירות השליחים למעבדה	יש לשלוח את הדגימות
❖ להמנע מייבוש הדגימות באוויר ❖ חוסר בכמות דגימה ❖ יש למלא את כל פרטי המטופל, הרופא המפנה סימנים קליניים, טיפולים וכו	טעויות נפוצות

יש לברר עם המעבדה את מועדי איסוף הדגימה טרם הדיגום

קרניאלי וט בע"מ המרכז לאבחון מולקולרי וטיפול בתאי גזע בבעלי חיים

ת.ד 1121 קרית טבעון מיקוד: 36015 טלפון: 04-9536166 פקס: 04-9536165
דואר אלקטרוני: vet@karnieli.com אתר: www.karnieli-vet.co.il